

Die Ltt - Lichtthermotherapie Handgerät Pflichtinformation
Lichtthermotherapie Methode nach Dr. med. APUL

A - ZUSAMMENSETZUNG WIRKUNGSWEISE:

TL 12° NGE als LAFER (mit ca.700 Facettenspiegel)
Lichtquelle 1 cm Entfernung pro 1 cm² 170 mW. liefert.
Um die Lichtenergie an körperlichen Zellen abzugeben (applizieren), wurde dieses Gerät speziell hergestellt.

- Unser Lebensabschnitt ist mit viel Stress verbunden; um den mit Stress verbundenen Energieverlust zu ergänzen, ist dieses eine Behandlungsweise, die sehr wirksam ist.
- Die Behandlung wirkt durchblutungsfördernd.
- Vermindert die Muskelspannungen. Am Anfang kann es zur Vermehrung der Schmerzen kommen.
- Bei richtiger Anwendung werden die

Muskuloskeletale Schmerzen beseitigt.

- Lokale oder regionale Hyperthermie Anwendung.
- Die Anwendung ist auch bei Depressionen wirksam. Aus dem Gerät tritt Lichtstrahlung aus, die bei unsachgemäße Anwendung zu Verbrennung und Brandzeugung führen kann.

B- ANWENDUNGSGEBIETE:

- Leichte bis schwergradige Depressive Episode aller Art, saisonabhängige Depression (=SAD), Angstzustände,
- Panische Störungen,
- Chronische Müdigkeit Fatigue Syndrom= CMS.
- Chronische rheumatische Beschwerden Formen Kreis Hals-W.S, Brust-W.S, Lenden- Wirbelsäulen Syndrom.
- Spondylitis ankylosans, Arthrose alle Art,
- Chronische Neuropathischer Schmerz Syndrom, Gewebe und Muskelverspannung, Biorhythmus Störungen, Regelschmerzen (Dysmenorrhoe) u.a.
- Hypertonie, Wegen Mangel an Sonnenlicht (z.B. U-Boote, Raumfahrt) durch zu Langen Aufenthalt in geschlossenen Räumen,
- Hautkrankheiten, Wundbehandlungen.

C- GEGENANZEIGEN :

- Bei Schwangerschaft und Kindern unter 6 Jahren sollte die Ltt Handgerät unter strenge Indikationen angewendet werden.
- Überempfindlichkeit gegenüber Licht, (Sonnenlichtallergie),
- Bestrahlung direkt an den Augen und Umgebung.
- mit Arsenhaltige oder Immun Supressiva Medikamenten,
- Bei verschiedenen Lähmungen - Hemiplegie in diesen Fällen besteht Verbrennungsgefahr.
- Bei akuten Oberbauch Beschwerden (z. b. Appendizitis u.a.)
- Bei akuten Fieberkrankheiten und akuten Rheumatischen Beschwerden Formenkreis, Starke Kopfschmerz, Malignome, Präkanseröse, Nävus, sollte es nicht angewendet werden.

D- INFORMATION UND VORSICHTSMAßNAHMEN :

- Das Lichtthermotherapie Handgerät von Kindern fernhalten und unzugänglich aufbewahren.
- Bei Kindern unter 6 Jahren, nicht anwenden.
- Die Anwendung bei Schwangeren kann zu frühzeitigen Wehenschmerzen ausgelöst werden.
- Während des Wochenbettes kann es angewendet werden.

E- NEBENWIRKUNGEN :

- Bei Patienten mit niedrigeren Blutdruck kann es zu Schwindel Anfällen führen. Bei Patienten mit hohem Blutdruckschwelle (**HYPERTONIE**) **BRAUCHT MAN KEINE VORSICHTSMAßNAHMEN** zu treffen. Bei Pacemaker

Patienten sollte es **VORSICHTIG ANGEWENDET WERDEN . BEIM**

AUFTRETEN VON NEBENWIRKUNGEN SOFORT DEN ARZT BENACHRICHTIGEN .

F- WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN ARZNEIMITTELN:

LICHTTHERMOTHERAPIE HANDGERÄT KANN MIT ANDEREN ARZNEIMITTELN DURCHFÜHRT WERDEN . SIE KÖNNEN IHRE MEDIKAMENTE WEITER HIN EINNEHMEN . DIE RHEUMATISCHEN BESCHWERDEN WERDEN WENIGER UND DAS EINNEHMEN VON MEDIKAMENTEN WIRD VERRINGERT. IM BLUT WERDEN DIE FETTE UND DAS CHOLESTERIN ETWAS ABGEBAUT, ES HÄNGT NATÜRLICH MIT DER ANWENDUNG ZUSAMMEN. LICHTTHERMOTHERAPIE GERÄT KANN SCHLAFFÖRDERND WIRKEN.

G- ART DER ANWENDUNG UND DOSIERUNG :

TL 12° NGE als LAFER (mit ca.700 Facettenspiegel)
Lichtquelle 1 cm Entfernung pro 1 cm² 170 mW. liefert.
LICHTTHERMOTHERAPIE HANDGERÄT KANN AM TAG IN 3 STUNDEN ABSTÄNDEN 1-4 MAL , CA. BIS JEWEILS 16 MNUTEN ANGEWENDET WERDEN . BEI SEHR STARKEN SCHMERZEN (AUSNAHMEN BEACHTEN - PUNKT C) IST DIE ANWENDUNG VON LICHTTHERMOTHERAPIE- LTT HANDGERÄT MEHRMALS AM TAG ZU EMPFEHLEN .

H- ÜBER DOSIERUNG UND MASSNAHMEN:

Um eventuelle Verbrennungsgefahren auszuweichen, bitten wir Sie unbedingt die Anweisungen Ihres behandelnden Arztes und der Bedienungsanleitung sorgfältig zu befolgen.

BEI EINER ÜBERDOSIS (SCHWINDELGEFÜHL, STARKE KOPFSCHMERZEN , SCHWARZ VOR DEN AUGEN , SCHWERE ÜBERMÜDUNGERSCHWEINUN GEN), SOFORT MIT DER BEHANDLUNG AUFHÖREN. UND IHREN BEHANDELNDEN ARZT AUFSUCHEN .

I- AUFBEWAHRUNG:

DAS LTT - HANDGERÄT BEI NICHTBENUTZUNG AUSSCHLIEßLICH IN DER ORIGINAL VERPACKUNG UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN .
DAS LTT - HANDGERÄT VOR NÄSSE UND FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN.

Das Instrument nicht unter -10°C und über + 40°C Raumtemperatur aussetzen. Beim Transport nur die original Verpackung benutzen.

J- HERSTELLER, SERVICE, ANGEBOT, UND VERPACKUNGS- INHALT:

Herstellung und Vertrieb wird ausschließlich durch die Firma Lichthansa in 28211 Bremen durchgeführt. Der Handel von original Teilen und Zubehör durch Drittpersonen / Firmen beruht auf eine schriftlich Genehmigung des o.a Vertriebs.

Für Reparaturarbeiten senden Sie das Handgerät in der original Verpackung mit Garantieschein und Kassenbon an unsere Service Partner zu. Die Service Adresse finden Sie hierzu in der Bedienungsanleitung auf Seite 14. Laufende Angebote können Sie schriftlich oder telefonisch von unserer Firma anfragen.

Beim Neukauf des Ltt- Lichtthermotherapie Handgeräts befindet sich in der original Verpackung :

- Die Ltt - Handgerät,
- Zwei Stück Energie Quellen,
- Klein und groß Distanz Regler je Zwei Stück,
- Bedienungshandbuch
- Visuelle Therapieanleitung,
- und dieser Prospekt.
- die Tragetasche, -Aroma
- Duftstein und Zubehör
- Farbgelaser (optional)

Das Ltt - Handgerät ist unter der Genehmigungs- und Patentnummer EP 1005 880, DP 19856002 registriert.